



H2 PURE INHALE 150



**Molekylær hydrogen produceres via strøm
og Demineraliseret vand**



SÅDAN KOMMER DU IGANG

Skru låget af tanken og hæld 2,5 dl. demineraliseret vand i maskinen indtil vandniveauet er mellem de to sorte vand indikatorer som ses på maskinens front.

Tænd maskinen på start-knappen og maskinen vil lyse med et blåt lys.

Lyser den i stedet rødt kan det betyde at 3 ting:

1. Der er for lidt Demineraliseret vand i tanken
2. Der er for meget demineraliseret vand i maskinen
3. Det demineraliserede vand er ikke rent nok

Husk altid at købe det demineraliserede vand i Matas.



Et tryk vil aktivere maskinen til at producere hydrogen i 1 time

To hurtige tryk vil aktivere maskinen til at producere hydrogen i 2 timer

DRIFT AF H2 PURE INHALE

Efter 20 timers brug tømmes maskinen for vand og nyt demineraliseret vand hældes på

Problem		årsag/Løsning
virker ikke ingen lys i display		Strømkabel er ikke korrekt monteres Power adaptor beskadiget
Der kommer ingen H2		Er du i tvivl kan du komme næse kartetret i et glas vand og se om det bobler. Eller holde næse karteteret ind mod tungen og du vil kunne mærker H2 gas sen på tungen Lækage på silikone slangen.
Der kommer kun H2 ud af det ene næsehul		Det er helt normalt. H2 vil altid gå den hurtigste vej, dvs at hvis de ene næse hul er en my højere oppe end det andet vil det kun komme ud af det øverste.
Der kommer vand i næsen		Den grønne fugtopsamler A. Er fyldt med vand og skal tømmes B. Er vendt forkert. Pilene skal pege direkte mod hinanden

PRODUKT SPECIFIKATIONER

H2 PURE INHALE - 150

Power

220V +/- 10% 50 Hz - 60Hz

Vægt

1,6 kg.

Kapacitet i vand tank

250 ml

Trykstabilitet

<0.001 Mpa

Hydrogen MAX output

150 ml/min

Oxygen MAX output

75 ml/min

Strømforbrug

80 Watt

Vand kvalitet

Burger KUN demineraliseret vand